

## MomCare Hřejivý bederní pás pro úlevu od porodních bolestí

## MomCare Hřejivý bedrový pás na úľavu od pôrodných bolestí

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

**CZ**

### Návod k použití

1. Rozbalte pás a vyjměte jej z obalu. Pás se začne zahřívát 3–5 minut po kontaktu se vzduchem. Použijte ihned po otevření.
2. Během porodu přiložte hřejivou část pásu na bedra (během kojení či menstruace na břicho) a upravte elastický pás.
3. Užijte si teplo a úľevu po dobu přibližně 8 hodin. Pás můžete aplikovat přímo na kůži, přes poporodní kalhotky nebo na kojící košili.

### Upozornění

- Pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na poraněnou pokožku.
- Výrobek není vhodný pro malé děti, diabetiky a osoby s kožními alergiemi.
- Jednorázový výrobek – nepoužívejte opakovaně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nejedná se o zdravotnický prostředek ani náhradu léků – produkt neslouží k léčbě či prevenci nemocí.
- **Nepoužívejte v počátečních fázích těhotenství – pouze během porodu nebo po něm!**

### Složení výrobku

Textilie: Lékařská netkaná textilie, elastický pás šetrný k pokožce.

Hřejivá vrstva: Dřevěné aktivní uhlí v prášku, železný prášek, vermikulit, absorpční pryskyřice, sůl, voda.

Rozměry: 13 cm x 107 cm

Skladujte v původním obalu, na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

**SK**

### Návod na použitie

1. Rozbalte pás a vyberte ho z obalu. Pás sa začne zahrievať 3–5 minút po kontakte so vzduchom. Použite ihneď po otvorení.
2. Počas pôrodu priložte hrejivú časť pásu na bedrá (počas dojčenia alebo menštruácie na brucho) a upravte elastický pás.
3. Užite si teplo a úľavu približne 8 hodín. Pás môžete aplikovať priamo na kožu, cez popôrodné nohavičky alebo na dojčiacu košeľu.

### Upozornenie

- Iba na vonkajšie použitie. Nepoužívajte na poranenú pokožku.
- Výrobok nie je vhodný pre malé deti, diabetikov a osoby s kožnými alergiami.

- Jednorazový výrobok – nepoužívajte opakovane.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nejedná sa o zdravotnícky prostriedok ani náhradu liekov – produkt neslúži k liečbe či prevencii chorôb.
- **Nepoužívajte v počiatočných fázach tehotenstva – iba počas pôrodu alebo po ňom!**

**Zloženie výrobku:**

Textília: Lekárska netkaná textília, elastický pás šetrný k pokožke.

Hrejivá vrstva: Drevené aktívne uhlie v prášku, železný prášok, vermikulit, absorpčná živica, soľ, voda.

Rozmery: 13 cm × 107 cm

Skladujte v pôvodnom obale, na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.